

## 1. Účel použití:

Držák hole je určen jako příslušenství k lůžkům se zábranami vyráběnými firmou PROMA REHA s.r.o.. Slouží pro zavěšování holí. Svými technickými vlastnostmi je určen výhradně pro použití v interiéru, a to s lůžky vyráběnými firmou PROMA REHA s.r.o..

Držák je určen pouze k zavěšování samostatných holí, nikoliv k zavěšování jakýchkoliv jiných předmětů.

## 2. Varování:

Držák je nutné chránit před mrazem, stykem s ostrými předměty a před prudkými nárazy, či jiným mechanickým namáháním.

## 3. Technický popis a základní parametry:

Držák hole kovový



Držák je vyroben z ocelových plechů s povrchovou úpravou zinkem. Mechanismus uchycení holí je pryžový. Šířka 50 mm, výška 50 mm, hloubka 40 mm, hmotnost 0,2 kg.

Držák hole plastový



Držák je vyroben z plastu. Mechanismus uchycení holí je pryžový. Šířka 50 mm, výška 40 mm, hloubka 50 mm, hmotnost 0,2 kg.


## 4. Návod k montáži:

Zinkovaný držák přiložte na Vámi zvolené místo v čele lůžka. Dle nosné plochy si obkreslete otvory pro vruty na bedněni. Vrtáčkou s upevněným vrtákem o  $\varnothing 2$  mm vyvrtejte otvory maximálně 10 mm hluboké pro vruty. Pozor však ať při vrtání neprovrtáte celou šíři bedněni!!! Opět přiložte držák k bedněni s předvrtanými otvory a pomocí dvou vrutů jej připevněte k bedněni. Všechny vruty řádně dotáhněte šroubovákem. Tím je držák hole připraven k používání.

Při montáži plastového držáku nejprve vychyľte pryžovou část mimo plastové pouzdro a následně postupujte obdobným způsobem jako u držáku zinkovaného. Po řádném dotažení držáku vraťte pryžovou část zpět do vnitřního prostoru plastového pouzdra. Tím je držák hole připraven k používání.



Držák hole kovový

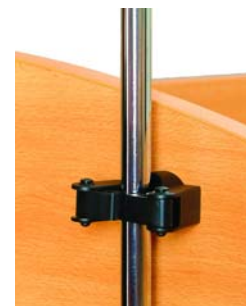

Držák hole plastový

## 5. Návod k použití:

Hůl do držáku zatlačte v libovolném místě hole. Odejmutí hole z držáku provedete opačným způsobem.

## 6. Čištění:

Držák hole čistěte běžnými tekutými saponátovými a dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem. Je nezbytné vyloučit abrazivní čisticí prostředky, jako např. písky na nádobí či drátěnky.

Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování desinfekčních prostředků, nebo nedostatečné či chybné péči o držák holí mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka. Držák hole není určen do myček ani sterilizátorů!!!

## 7. Údržba:

Držák hole nevyžaduje žádnou údržbu ani pravidelný servis.

## 8. Záruka:

Na držák hole je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní nebo jiná smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo autorizované servisní středisko, na základě písemného osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává výrobce.

## 9. Likvidace produktu:

Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. Neobsahuje žádné nebezpečné látky a jeho provozní hlučnost splňuje všechny požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb.

Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech. Roztřídte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití.

Výrobek obsahuje recyklovatelné ocelové části s povrchovou úpravou zinkem a dále plastové a pryžové části. Pro likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci specializovanou na tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.



**Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu při odstraňování odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!**

## 10. Obsah balení:

1 x Držák hole dle specifikace výše

1 x Návod k použití