

ŠLAPADLO

Typ ZPT – 5720

Popis:

Konstrukce pomůcky je vyrobena z povrchově upravených ocelových trubek. Pedály s protiskluzovou úpravou a nastavitelným páskem jsou umístěny do ložiska s možností nastavení odporu otáčení. Otočením aretační plastové matice lze nastavit obtížnost otáčení pedálů. Opěrné části pedálové pomůcky jsou opatřeny pryžovými násadci.

Návod k použití:

Kovové nohy dejte naproti sobě. Nasadte gumové těsnění a rám s pedály a utáhněte šrouby. Nakonec nasadte tvarovaný (ozubený) šroub na nastavení zátěže. Pravidelně kontrolujte dotažení všech šroubů.

Varování:

Používejte pedálovou pomůcku pouze na suchou nohu! Před používáním konzultujte cvičební zátěž s Vaším lékařem nebo fyzioterapeutem.

Čištění a údržba:

Pro čištění použijte běžné čisticí a desinfekční prostředky, které neobsahují žádná rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Pro zachování plynulosti otáčení doporučujeme pravidelně promazat ložiska pedálů, popř. odstranit mechanické nečistoty.

Záruční podmínky:

- Výrobek musí být používán pouze k účelu, ke kterému je určen. Uživatel se musí řídit pokyny návodu k použití.
- Záruka pozbývá platnosti, pokud uživatel používá výrobek v rozporu s návodem k použití, a k jinému účelu, než ke kterému je výrobek určen. Záruka se nevztahuje na součástky podléhající přirozenému opotřebení, jako je zejména odření nebo znečištění pedálů či pásků, sedření pryžových násadců používáním apod. Záruka se nevztahuje na kterékoli části výrobku mechanicky poškozené.
- Záruka musí být uplatněna tam, kde byl výrobek zakoupen.
- Při uplatnění záruky musí být předložen řádně vyplněný záruční list a kopie nabývacího dokladu.
- Reklamační řízení lze zahájit, jestliže je reklamované zboží kompletní. Reklamované zboží musí být řádně vyčištěné, jinak není prodejce povinen zboží přijmout do reklamačního řízení.
- Záruční dobou nelze zaměňovat s užitnou dobou, tj. dobou, po kterou při správném používání a správné údržbě lze výrobek řádně užívat.
- Za škody vzniklé na výrobku z důvodu neodborného zacházení v rozporu s návodem k použití prodejce neodpovídá.
- Záruční doba je 24 měsíců od data prodeje.

Prodejce:



ZP-TECH s.r.o., Riegrova 342, CZ-55203 Česká Skalice

Tel.: +420 491 11 22 90, +420 491 45 10 23

www.zptech.cz, info@zptech.cz

IČO: 25932292, DIČ: CZ25932292