



Sedačka do sprchy ZPT-5030



Sedačka do sprchy s opěradlem ZPT-5015KD

## 1. Účel použití:

Sedačka je určena pro osoby se sníženou pohyblivostí. Napomáhá při hygieně ve sprchových koutech a koupelnách. Svými technickými vlastnostmi je určena výhradně pro použití v interiéru!

Stolička je určena pouze k sedění, nikoliv ke stání a jiným činnostem.

## 2. Varování:

Plastovou část je nutné chránit před přímým ohněm, stykem s ostrými předměty a před prudkými nárazy či jiným mechanickým poškozením. V případě poškození sedačku nepoužívejte a neprodleně kontaktujte výrobce.

## 3. Technický popis a základní parametry:

Sedačka je vyrobena z ocelových trubek, kompozitního plastového sedáku a gumových návleků proti smyku na mokřem povrchu. Rám sedačky je povrchově upraven práškovým lakem.

**ZPT-5030** – rozměr sedáku 40 x 36 cm, výškové nastavení 34 – 47 cm

**ZPT-5015KD** – rozměr sedáku 40 x 36 cm, výškové nastavení 34 – 47 cm, celková výška s opěradlem 68-81 cm

## 4. Návod k montáži a použití:

Sedačka je dodávána v demontovaném stavu.

**ZPT-5030:** Odstraňte veškerý obalový materiál a k plastovému sedáku přišroubujte pomocí spojovacího materiálu, který je příbalem, dvě nohy. Plastový sedák je ze spodní strany prolisován a je opatřen otvory se závity, ke kterým se nohy sedáku přišroubují. Všechny šroubové spoje řádně dotáhněte.

**ZPT-5015KD:** Odstraňte veškerý obalový materiál a k plastovému sedáku přišroubujte pomocí spojovacího materiálu, který je příbalem, dvě nohy. Plastový sedák je ze spodní strany prolisován a je opatřen otvory se závity, ke kterým se nohy sedáku přišroubují. Následně k plastovému sedáku a opěradlu přišroubujte zbývající dva držáky. Všechny šroubové spoje řádně dotáhněte.

Sedačka je vybavena výškově nastavitelnými nožičkami, které se odjišťují pomocí mechanických aretací po jejich obvodu. Vždy nejprve odjistíte mechanickou aretaci, následně nastavte nožičku do požadované pozice a pak ji řádně zajistíte. Toto provedte vždy u všech nožiček. Pozor, v případě nestejněho vysunutí nožiček ztrácí sedačka svoji stabilitu.

## 5. Čištění:

Před prvním použitím doporučujeme sedačku řádně vyčistit. Sedačku čistěte běžnými tekutými saponátovými a dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem. Je nezbytné vyloučit abrazivní čisticí prostředky, jako např. písky na nádobí či drátěnky.

Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování desinfekčních prostředků, nebo nedostatečné či chybné péči o sedačku mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka. Sedačky nejsou určeny do myček ani sterilizátorů!

#### **6. Údržba:**

Jedenkrát za rok zkontrolujte řádné dotažení šroubů upevňujících kompozitní sedák k rámu. Dále zkontrolujte, zda nedošlo k uvolnění pryžových návleků nožiček.

Pokud dojde při údržbě k zjištění závady, kontaktujte prodejce či výrobce.

#### **7. Servis:**

Sedačka nevyžaduje žádné pravidelné servisní zásahy.

#### **8. Záruka:**

Na sedačku je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní nebo jiná smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo autorizované servisní středisko, na základě písemného osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává výrobce.

#### **9. Likvidace produktu:**

Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí a neobsahuje žádné nebezpečné látky.

Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech. Roztřídte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití.

Výrobek obsahuje recyklovatelné ocelové části s povrchovou úpravou vypalovacími laky, chromem či zinkem. Dále výrobek obsahuje plastové a pryžové části. Pro likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci specializovanou na tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.



Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu při odstraňování odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!

#### **10. Obsah balení:**

1 x Sedačka dle typu na úvodní straně

1 x Návod k použití