

## 1. Účel použití:

Schůdky jsou určeny pro zdravotnický personál a pro osoby se sníženou pohyblivostí. Napomáhá při zdolávání výškových překážek, uléhání na postele a především obsluze při práci s pacientem. Schůdek je určen pro použití v interiéru na rovných podlahách.

## 2. Varování:

Schůdky jsou výhradně určeny ke zdolávání výškových překážek pro uživatele, nikoli k odkládání břemen apod. Protiskluzovou gumovou část je nutné chránit před přímým ohněm a mechanickým namáháním ostrými předměty. V případě poškození schůdky dále nepoužívejte a neprodleně kontaktujte výrobce.

## 3. Technický popis a základní parametry:

Schůdky jsou vyrobeny z ocelových trubek, plechu, protiskluzové gumy a gumových návleků proti smyku na mokřem povrchu. Rám schůdku je povrchově upraven práškovým lakem. Nosnost schůdku je 120 kg.

Schůdek jednostupňový

Schůdek dvoustupňový

Schůdek dvoustupňový s madlem



CE  
hloubka 24 cm, šířka 46 cm,  
výška stupně 24 cm,  
hmotnost 3 kg



CE  
hloubka 46 cm, šířka 46 cm,  
výška stupně 24 a 45 cm,  
hmotnost 7 kg



CE  
hloubka 46 cm, šířka 46 cm,  
výška stupně 24 a 45 cm,  
celková výška s madlem 127 cm,  
hmotnost 9 kg

## 4. Návod k montáži a použití:

Po odstranění veškerého balicího materiálu je schůdek připraven k použití. Při použití dbejte vždy na řádné postavení schůdku na čisté rovné podlaze. Při užití schůdku v koupelnách a sprchách na něj nastupujte velmi opatrně, přestože je vybaven protiskluzovými gumovými návleky. Mohlo by dojít k jeho posunutí (sklouznutí) a následnému ublížení na zdraví.

## 5. Čištění:

Před prvním použitím doporučujeme schůdek řádně vyčistit. Schůdky čistěte běžnými tekutými saponátovými a dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem. Je nezbytné vyloučit abrazivní čisticí prostředky a pomůcky, jako např. písky na nádobí či drátěnky.

Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování desinfekčních prostředků, nebo nedostatečné či chybné péči o schůdek mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka. Schůdky nejsou určeny do myček ani sterilizátorů!

## 6. Údržba:

Schůdky nevyžadují žádnou speciální údržbu. Jedenkrát za rok zkontrolujte zda nedošlo k uvolnění pryžových návleků nožiček a pryžových nášlapných stupňů. Pokud ano, přilepte je vhodným lepidlem pro styčné plochy pryž – železo.

Pokud dojde při údržbě schůdku k zjištění závady, kontaktujte prodejce či výrobce.

## 7. Servis:

Schůdky nevyžadují žádné pravidelné servisní zásahy.

## 8. Záruka:

Na schůdky je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní nebo jiná smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo autorizované servisní středisko, na základě písemného osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává výrobce.

## 9. Likvidace produktu:

Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. Neobsahuje žádné nebezpečné látky a jeho provozní hlučnost splňuje všechny požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb.

Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech. Roztřídte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití.

Výrobek obsahuje recyklovatelné ocelové části s povrchovou úpravou vypalovacími laky, chromem či zinkem. Dále výrobek obsahuje pryžové části. Pro likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci specializovanou na tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.



**Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu při odstraňování odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!**

## 10. Obsah balení:

1 x Schůdek dle specifikace výše

1 x Návod k použití