

- univerzální D \_\_\_ mm, 
  pevné krakorcové \_\_\_ mm, 
  135° 2 příruby, 
  135° 3 příruby, 
  2 x 135°, 
  90° levé, 
  90° pravé

## 1. Účel použití:

Madlo je určeno pro osoby se sníženou pohyblivostí. Napomáhá při zvedání, sedání a při udržování stability. Svými technickými vlastnostmi je určeno výhradně pro použití v interiéru!

## 2. Varování:

Madlo nelze připevnit do nenosných stěn a přiček, jako jsou např. bytová jádra, sádkartonové příčky, sádkové příčky, dřevěné příčky apod.

## 3. Technický popis a základní parametry:


Madla jsou vyrobena z nerezové nebo ocelových trubek a plechů s povrchem z práškového laku. Technické parametry jednotlivých typů jsou uvedeny níže.

Madlo univerzální D \_\_\_ mm



délka 300 – 1500 mm,  
dvě příruby

Madlo pevné krakorcové

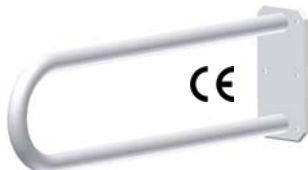

délka 600 a 800 mm,  
jedna příruba

Madlo 135° 2 příruby



rozměr 400 x 400 mm,  
2 příruby

Madlo 135° 3 příruby



rozměr 400 x 400 mm,  
3 příruby

Madlo 2 x 135° 3 příruby



rozměr 300 x 300 x 300 mm,  
3 příruby

Madlo 90° levé



rozměr 600 x 400 mm,  
3 příruby

Madlo 90° pravé



rozměr 600 x 400 mm,  
3 příruby

## 4. Návod k montáži a použití:

Po odstranění všech částí obalu madlo přiložte na nosnou stěnu nosnými kruhovými terči do místa, kde jej chcete osadit. Dle nosných terčů obkreslete otvory pro vrtuty na stěnu. Vrtačkou s upevněným vidiovým vrtákem o  $\varnothing 8$  mm vyvrtajte otvory minimálně 40 mm hluboké pro hmoždinky. Otvory řádně vyčistěte od zbytků omítky a prachu a zatlačte do nich hmoždinky. Zkontrolujte, zda všechny hmoždinky pevně drží v otvorech. Poté přiložte madlo ke stěně a pomocí vrtutů do hmoždinek jej připevněte ke stěně. Všechny vrtuty řádně dotáhněte křížovým šroubovákem. Tím je madlo připraveno k používání.

## 5. Čištění:

Před prvním použitím doporučujeme madlo řádně vyčistit. Čistěte jej běžnými tekutými saponátovými a dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem. Je nezbytné vyloučit abrazivní čisticí prostředky a pomůcky, jako např. písky na nádobí či drátěnky.

Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování desinfekčních prostředků, nebo nedostatečné či chybné péči o madlo mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka.

## 6. Údržba:

Jedenkrát za rok zkontrolujte a popřípadě dotáhněte šrouby uchycení ke zdi.

## 7. Servis:

Madlo nevyžaduje žádné pravidelné servisní zásahy.

## 8. Záruka:

Na madla je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní nebo jiná smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo autorizované servisní středisko, na základě písemného osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává výrobce.

## 9. Likvidace produktu:

Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. Neobsahuje žádné nebezpečné látky a jeho provozní hlučnost splňuje všechny požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb.

Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech. Roztřídte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití.

Výrobek obsahuje recyklovatelné nerezové či ocelové části s povrchovou úpravou vypalovacími laky. Pro likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci specializovanou na tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.



**Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu při odstraňování odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!**

## 10. Obsah balení:

- 1 x Madlo dle specifikace výše
- 1 x Sada zápusných vrtů s čočkovou hlavou (dle typu madla)
- 1 x Sada hmoždinek (dle typu madla)
- 1 x Návod k použití