

## 1. Účel použití:

Hole a berle jsou určeny pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácvičku chůze, pooperačních a poúrazových stavech a následné rehabilitaci.

## 2. Varování:

Hole a berle jsou určeny pro použití v interiéru i exteriéru.

## 3. Technický popis a základní parametry:

Konstrukce a holí a berlí je provedena z duralových trubek s velmi vysokou pevností. Hole i berle jsou dále doplněny pohodlnými ergonomicky tvarovanými rukojeťmi a oporami předpaží. Všechny hole a berle jsou výškově nastavitelné pomocí stahovací matice ve spodní části. Samozřejmostí je protiskluzový návlek.

### Základní technické parametry holí a berlí:

ZPT-2031 – výškově nastavitelná 158-178 cm

ZPT-2040 – výškově nastavitelná 158-178 cm

ZPT-2002 – výškově nastavitelná 158-178 cm

ZPT-2320 – výškově nastavitelná 74-99 cm



## 4. Návod k montáži a použití:

Hole i berle jsou dodávány ve zkompletovaném stavu a jsou po rozbalení a odstranění veškerého balícího materiálu připraveny k použití. Výškové nastavení se provádí zasunutím aretačního prvku hole do nohy hole a následným zasunutím resp. vysunutím nohy. Při tomto pohybu dojde k automatické aretaci v nejbližší možné aretované poloze. V případě potřeby ještě větší prodloužení resp. zkrácení hole postupujte obdobným postup. Opět zatlačte aretační pojistku do nohy hole a přednastavte výšku hole vysunutím resp. zasunutím do další nejbližší možné aretované pozice.

Pro zachování maximální stability doporučujeme **pravidelně kontrolovat stav pryžových návleků** holí a berlí. V případě opotřebení pryžových návleků kontaktujte dodavatele. Dále **pravidelně kontrolujte aretační mechanismus**, tzn. polohy aretačních kolíků. **Pokud by aretační kolík byl zamáčknutý do nohy hole nebo berle, mohlo by dojít při zatížení s samovolnému zasunutí hole a následnému ublížení na zdraví!**

## 5. Čištění:

Hole a berle čistěte běžnými tekutými saponátovými a dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných výrobcem. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem. Je nezbytné vyloučit abrazivní čisticí prostředky, jako např. písky na nádobí či drátěnky.

Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování desinfekčních prostředků, nebo nedostatečné či chybné péči o stojan mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka. Pojiždný infúzní stojan není určen do myček ani sterilizátorů!

## 6. Údržba a servis:

Hole ani berle nevyžadují žádnou speciální údržbu či servis.

## 7. Varování:

Při chůzi na vlhkém podkladu hrozí zvýšené nebezpečí úrazu! Proto používejte obuv s protiskluzovou podrážkou a hole či berle s kvalitním nepoškozeným pryžovým návlekm. Správnou délku hole či berle pro výšku vaší postavy a zdravotní dispozici konzultujte s vaším lékařem nebo fyzioterapeutem.

## 8. Záruka:

Na berle i hole je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní nebo jiná smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo autorizované servisní středisko, na základě písemného osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává výrobce.

## 9. Likvidace produktu:

Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. Neobsahuje žádné nebezpečné látky. Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech. Roztřídte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití.

Výrobek obsahuje recyklovatelné duralové části s povrchovou úpravou laky nebo chromem. Dále výrobek obsahuje pryžové části. Pro likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci specializovanou na tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.



**Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu při odstraňování odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!**

## 10. Obsah balení:

1 x Hole / berle dle specifikace výše

1 x Návod k použití