

1. Účel použití:

Matrace jsou určeny pro nemocniční, ústavní a domácí použití a jsou vhodné pro použití společně s lamelovými nebo síťovými polohovacími rošty. Svými technickými vlastnostmi jsou určeny výhradně pro použití v interiéru!

2. Varování:

Při manipulaci se snímatelným potahem dbejte o to, aby potah ani jádro matrace nebyly poškozeny nevhodným postupem snímání a navlékání potahu.

3. Technický popis a základní parametry:

Sendvič – Sendvičová matrace se skládá ze střední vrstvy tvořené RE pěnou a dvou vnějších vrstev z PUR pěny. Střední vrstva zaručuje vyšší nosnost a prodlužuje životnost matrace. Matrace není vhodná při vniku dekubitů. Je dodávána v potahu SAFR, DAMAŠEK nebo BASIC. Výška matrace 14 cm, nosnost 110 kg.

Lux P – Preventivní antidekubitní matrace ze studené PUR pěny HR4045. Jádro matrace je podélně a příčně prořezáno. Průřezy v matraci zajišťují cirkulaci vzduchu, odvádí páry a zároveň chrání pacienta před vlhkostí a přehřátím. Dalším benefitem je snadnější ohyb při polohování lůžka a lepší kopírování tvaru těla uživatele. Matrace je vhodná pro pacienty se středním rizikem vzniku dekubitů I.-II. stupně. Je dodávána v potahu SAFR, DAMAŠEK nebo BASIC. Výška matrace 12 cm, nosnost 120 kg.

Thermic – Tato matrace je vyvinuta speciálně pro osoby obzvláště citlivé na otláčení, s vysokým rizikem vzniku dekubitů II.-III. stupně. Zvláštností této matrace je použití speciální vysoce elastické pěny pod označením Eucatherm C (líná pěna), jedná se o unikátní pěnu, jejíž tuhost se mění v závislosti na teplotě. Matrace nabízí jedinečné rovnoměrné rozložení tlaku matrace na tkáň, což má pozitivní vliv na krevní oběh. Tato matrace plně respektuje anatomii těla rozdělením do 7 zón. Je dodávána v potahu SAFR, DAMAŠEK nebo BASIC. Výška matrace 14 cm, nosnost 120 kg.

Potahy jsou vyrobeny z nánosové textilie Teporex Sanapur (SAFR), DAMAŠKU nebo tkaniny BASIC. Potah SAFR je z vnější strany plně omyvatelný a nepropustný, čímž umožňuje omývání matrace bez proniknutí desinfekčních prostředků do jádra matrace. Z vnitřní strany je prodyšný. Odpovídá všem hygienickým požadavkům ve zdravotnictví. Potahy DAMAŠEK a BASIC jsou vyrobeny z jednobarevné tkaniny se vzorováním. Potah DAMAŠEK se nesmí práť. SAFR a BASIC jsou pratelné při maximální teplotě 95°C.

4. Návod k použití:

Matrace včetně potahu jsou dodávány v ochranných přepravních obalech. Po vyjmutí z přepravního obalu je matrace připravena k použití po 24 hodinách při pokojové teplotě, kde se matrace bude užívat. Při odstraňování obalového materiálu nepoužívejte žádné ostré předměty, které by mohly porušit potah nebo vlastní jádro matrace. Matraci umístěte na rošt lůžka tak, aby vždy krycí lem zipu překrýval zip shora dolů (viz. obrázky vpravo). Samostatnou matraci bez prostěradla nevystavujte přímému slunečnímu záření, které urychluje změnu povrchových vlastností matrace i potahu. Při užívání může dojít ke zvlnění potahu. Vadou nejsou ani změny rozměru potahu způsobené běžným používáním matrace. U textilií může dojít ke zvlnění potahu. Vadou nejsou ani změny rozměru potahů způsobené běžným používáním matrace. Odchylka od rozměrů uvedených na štítku matrace může být ± 1,5% u šířky a ± 1% u délky potahu.

Před čištěním matrace je třeba oddělit matraci od potahu. Každý potah je opatřen zipem, který musí být před vkládáním matrace či jejím vyjímáním plně rozeprt. Při navlékání potahu matrace věnujte pozornost určení lícové a rubové strany (nejjednodušší je orientace pomocí jezdece zipu, který musí být ovladatelný z vnější (lícové) strany, případně u potahu SAFR je určující hladká nepropustná strana, která je stranou lící. Po zapnutí zipu je matrace včetně potahu připravena k použití.

5. Čištění:

Potahy čistěte pouze prostředky k tomu určenými a dbejte návodu k obsluze výrobce čistícího prostředku. Potahy matrací je nutno ošetřovat dle symbolů všitých do lemu každého potahu.

6. Údržba:

Matraci v potahu DAMAŠEK a BASIC jedenkrát měsíčně vysajte od prachu.

7. Záruka:

Na matrace je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka začíná dnem dodání, pokud kupní nebo jiná smlouva nestanoví jinak.

8. Likvidace produktu:

Výrobek je vyroben z materiálů šetrných pro životní prostředí a neobsahuje žádné nebezpečné látky. Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech. Roztrďte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití. Výrobek obsahuje textilní, polyuretanové, plastové a kovové části. Pro likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci specializovanou na tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.

Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu při odstraňování odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!

