

## 1. Účel použití:

Chodítka je určeno pro osoby se sníženou pohyblivostí. Napomáhá k udržení stability při chůzi a odlehčení dolních končetin. Svými technickými vlastnostmi je určeno výhradně pro použití v interiéru! Je zakázáno chodítka používat v exteriéru!

## 2. Varování:

Vhodnost použití chodítka musí vždy posoudit ošetřující lékař s přihlédnutím k diagnóze a zdravotnímu stavu pacienta. Chodítka nesmí být používána na šikmých plochách, jejichž sklon přesahuje 3,5°, rampách a na schodištích. Chodítka nesmí být použito k přepravě nepohyblivých osob, nákladů apod.. Konstrukce chodítka je navržena na maximální rovnoměrné zatížení 130 kg.

## 3. Technický popis a základní parametry:

Chodítka je vyrobeno z ocelových trubek s povrchem z práškového laku, zinkovaným nebo chromovaným. Podpažní opěrky jsou čalouněny koženkou, držadla jsou plastová. Spodní rám je osazen vpředu dvěma otočnými a vzadu dvěma pevně aretovanými kolečky. Do horního svislého rámu jsou zapuštěny výsuvné podpažní opěrky a na nich posuvná držadla. Ovládání všech částí chodítka je prováděno mechanicky pomocí svorných mechanismů.

Rozměry a parametry daných typů:


U-2: Délka 60 cm, šířka 50 cm, měnitelná výška 104 – 152 cm, hmotnost 12 kg.

U-2 dětské: Délka 50 cm, šířka 40 cm, měnitelná výška 84 – 132 cm, hmotnost 10 kg.



## 4. Návod k montáži:

Po vyjmutí chodítka z přepravního obalu odstraňte veškerý balicí materiál, kterým je chodítka opatřeno. Povolením plastových růžic šroubů na horní části rámu ⑤ uvolníte vždy samostatně každou z podpažních opěr ⑥. Ty nastavte vysunutím na požadovanou výšku a pootočením na potřebnou šířku a pevně utáhněte. Vysunutí lze provést max. do výšky označené ryskou. Ta musí být vždy skryta v nosné trubce. Obdobným způsobem seříďte i výšku úchytků ruky ⑦. Všechny spojovací klouby řádně dotáhněte. Před vlastním užitím podrobte chodítka zkoušce zdravé osobě s minimálně stejnou hmotností jakou má uživatel chodítka (ne však vyšší než je maximální přípustné rovnoměrné zatížení chodítka). Po zdárné zkoušce je chodítka připraveno k užívání.

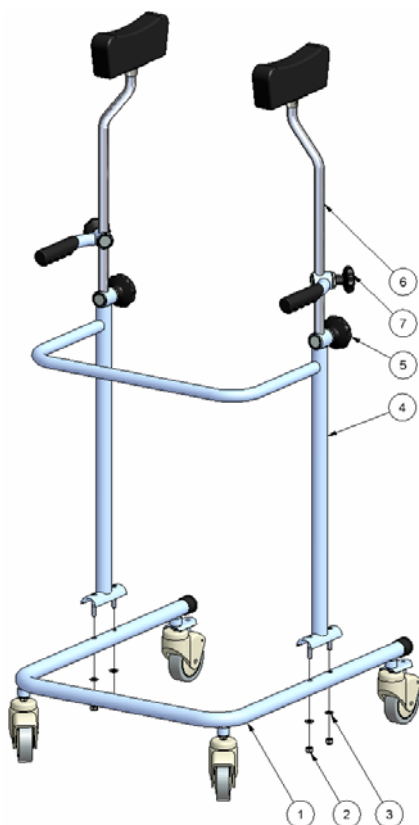

## 5. Návod k použití:

Chodítka vždy používejte pouze v interiéru, a to na rovných plochách, jejichž sklon nepřevyšuje 3,5°. V opačném případě by mohlo dojít k převrnutí chodítka i s obsluhou a ublížení na zdraví, či poškození okolních předmětů. Chodítka zabrzdíte sešlápnutím brzdné páčky vždy na dvou kolečkách, naopak odbrzdění provedete nadzvednutím brzdné páčky každého zabrzděného kolečka. Podpažní opěrky musí podírat v přirozeném postoji uživatele v podpaží, a to tak, že jej nenutí stát na špičkách, ani pokrčovat kolena. Nastavení podpažních opěr provádíte povolením šroubu ⑤, vysunutím resp. zasunutím podpažní opěrky a následným důkladným dotažením šroubů ⑤. Úchyty rukou nastavte tak, aby se natažené propnuté ruce dlaněmi opíraly o úchyty rukou a napomáhaly tak při chůzi nést tělo. Při správném nastavení úchytků rukou a podpažních opěr je váha rovnoměrně roznesena v podpaží a v rukou. V opačném případě budou jednotlivé partie rukou či podpaží namáhány nerovnoměrně. Toto nerovnoměrné rozložení zatížení se projeví předčasnou bolestí více namáhaných partií. Proto dbejte na důkladné nastavení a přizpůsobení podpažních opěr a úchytků ruky před vlastním užíváním.

## 6. Čištění:

Před prvním použitím doporučujeme chodítka řádně vyčistit. Chodítka čistěte běžnými tekutými saponátovými a dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem. Je nezbytné vyloučit abrazivní čisticí prostředky jako např. písky na nádoby či drátěnky.

Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování desinfekčních prostředků, nebo nedostatečné či chybné péči o chodítka mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka. Chodítka nejsou určena do myček ani sterilizátorů!

## 7. Údržba:

Jednou za rok je třeba zkontrolovat, případně dotáhnout šrouby držící kolečka podvozku.

Pokud dojde při údržbě chodítka k zjištění závady, kontaktujte prodejce či výrobce.

## 8. Servis:

Chodítka nevyžadují žádné pravidelné servisní zásahy.

## 9. Záruka:

Na chodítka je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní nebo jiná smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo autorizované servisní středisko, na základě písemného osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává výrobce.

## 10. Likvidace produktu:

Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. Neobsahuje žádné nebezpečné látky a jeho provozní hluknost splňuje všechny požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb.

Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech. Roztříděte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití.

Výrobek obsahuje recyklovatelné ocelové části s povrchovou úpravou vypalovacími laky, chromem či zinkem. Dále výrobek obsahuje dřevěné, plastové, textilní a pryžové části. Pro likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci specializovanou na tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.



**Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu při odstraňování odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!**

## 11. Obsah balení:

1 x Chodítka dle specifikace výše

1 x Návod k použití