

1. Účel použití:

Hrazda s hrazdičkou k lůžku je určena pro usnadnění pohybu pacientů ležících na lůžku.

2. Varování:

Hrazda s hrazdičkou k lůžku jsou určeny pouze pro lůžka vyráběná firmou PROMA REHA s.r.o.! Jsou určeny k použití v interiéru a jejich maximální zatížení je 75 kg.


3. Technický popis a základní parametry:

Hrazda je vyrobena z ocelové silnostěnné trubky povrchově upravené práškovým vypalovaným lakem. Ve spodní části je opatřena frézovanou aretační drážkou. V horní části je osazena zajišťovacím kolíkem hrazdičky. Hrazdička je plastová s textilním popruhem o nastavitelné délce.

Základní technické parametry hrazdy:

délka 945 mm, šířka 41 mm, výška 1370 mm, hmotnost 5 kg.

4. Návod k montáži a použití:

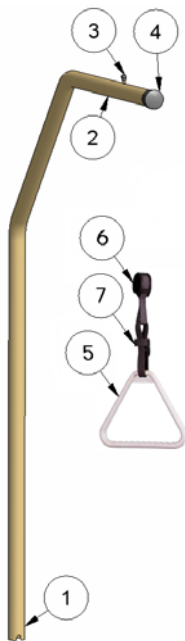

Po odstranění všech částí obalu jsou hrazda s hrazdičkou připraveny k umístění na lůžko. Spodní konec hrazdy ① je připraven pro zasunutí do držáků v rozích rámu lůžka. Před zasunutím hrazdy nejprve odstraňte plastovou zásepku, kterou je každý z držáků opatřen. Hrazda se nasazuje volným zasunutím spodního konce ① do jednoho z držáků v rozích rámu lůžka. Horní konec hrazdy ② je opatřen zásepkou ④ a trnem ③. Mezi tyto prvky volně navlékněte oko ⑥ popruhu hrazdičky ⑤. Požadovanou výšku hrazdičky nastavte pomocí spony ⑦. Otáčejte hrazdou tak, aby její horní konec směřoval nad střed lůžka. Hrazda se samovolně zajistí v optimální poloze a již s ní nebude možno dále otáčet. V tuto chvíli je hrazda s hrazdičkou připravena k použití. Pokud potřebujete hrazdu vychýlit ze své optimální polohy, nadzvedněte ji o cca 15 mm vzhůru a otočte v požadovaném směru vychýlení. Po navrácení hrazdy do optimální polohy se opět samovolně zajistí.

Demontáž se provádí vysunutím hrazdy z držáku v rohu rámu postele směrem vzhůru.

5. Čištění:

Před prvním použitím doporučujeme hrazdu s hrazdičkou řádně vyčistit. Hrazdu s hrazdičkou čistěte běžnými tekutými saponátovými a dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem. Je nezbytné vyloučit abrazivní čisticí prostředky, jako např. písky na nádoby či drátěnky. Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování desinfekčních prostředků, nebo nedostatečné či chybné péči o hrazdu s hrazdičkou mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka. Hrazda s hrazdičkou nejsou určeny do myček ani sterilizátorů!

6. Údržba a servis:

Hrazda s hrazdičkou nevyžadují žádnou údržbu ani servis. Jedenkrát do roka zkontrolujte plastovou sponu hrazdičky, zda není prasklá a nehrozí uvolnění staženého popruhu, stav popruhu a v neposlední řadě plastovou hrazdičku.

7. Záruka:

Na hrazdu s hrazdičkou je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní nebo jiná smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo autorizované servisní středisko, na základě písemného osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává výrobce.

8. Likvidace produktu:

Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. Neobsahuje žádné nebezpečné látky a jeho provozní hluknost splňuje všechny požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb.

Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech. Roztříďte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití.

Výrobek obsahuje recyklovatelné ocelové části s povrchovou úpravou vypalovacími laky a dále plastové a pryžové části. Pro likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci specializovanou na tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.

Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu při odstraňování odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!

9. Obsah balení:

1 x Hrazda s hrazdičkou, 1 x Návod k použití



CE

